



Nouveau!
Test
vitamine D



■ ■ ■ Système Qualigen FastPack® IP Immunodosage quantitatif

Compétence et rentabilité accrues pour votre laboratoire POC.

Utilisation simplifiée grâce à la pochette FastPack® IP.

- **Rapide** – PSA, fPSA, TESTO, fT4, TSH, β hCG, 25-OH-vitamine D en 15 minutes maxi
- **Ultra sensible** – La technique d'immunodosage chimio-luminescent fournit des résultats de qualité laboratoire
- **Totalement automatique** – Une simple pression sur un bouton suffit pour déclencher l'analyse
- **Convivial** – La pochette FastPack® IP contient tous les réactifs nécessaires
- **Orienté patient** – Les résultats sont disponibles lors de la consultation



rapide
ultra sensible

Axonlab

connecting ideas

Utilisation simplifiée



1. Remplir l'échantillon dans la pochette FastPack® IP



2. Charger la pochette FastPack® IP dans l'analyseur



3. Appuyer sur démarrer



Caractéristiques techniques

Spécification	Description
Traitement des échantillons	Totalement automatique
Matériau d'échantillon	Sérum et/ou plasma
Volume d'échantillon	100 µl par analyse
Principe de mesure	Immunodosage par chimio-luminescence
Contrôle de qualité	A l'aide d'un kit de contrôle
Calibrage	A l'aide d'un kit de calibration
Débit d'analyse	Jusqu'à 4 analyses/h
Dimensions/Poids	(L x P x H) : 33 x 23 x 30 cm / 9 kg
Affichage	Écran à cristaux liquides
Imprimante	En option
Interface	RS-232C
Alimentation secteur	220-240 V, 50/60 Hz
Conditions d'utilisation	Température: de 15°C à 32°C humidité de l'air: entre 10% et 90%

Paramètres

	Plasma	Sérum	Sensibilité
tPSA	■	■	0.04 ng/ml
fPSA		■	0.05 ng/ml
Testostérone	■	■	0.13 ng/ml
TSH	■	■	0.04 µIU/ml
ft4	■	■	0.4 ng/dl
βhCG	■	■	1.8 mIU/ml
25-OH-vitamine D	■	■	19.8 ng/ml



Le système Qualigen FastPack® IP est un système d'immunodosage par chimio-luminescence extrêmement sensible, qui permet de disposer des analyses nécessaires en cours de consultation. Vous pourrez ainsi communiquer les résultats immédiatement à vos patient(e)s et prendre dans la foulée les décisions nécessaires à un traitement ultérieur.

Le FastPack® IP de Qualigen – le dispositif d'analyse idéal pour votre laboratoire POC!

Axonlab

Axon Lab AG

www.axonlab.com

Baden (CH): info@axonlab.ch
 Le Mont/Lausanne (CH): info_f@axonlab.ch
 Mladá Boleslav (CZ): info@axonlab.cz
 Polling (A): info@axonlab.at
 Reichenbach/Stuttgart (D): info@axonlab.de
 Rogatec (SI): info@axonlab.si

Tel. +41 (0)56 484 80 80
 Tél. +41 (0)21 651 71 50
 Tel. +420 326 921 318
 Tel. +43 (0)523 887766
 Tel. +49 (0)7153 9226-0
 Tel. +386 (0)3 818 61 12